




Guía Rápida de la Prueba

- 1 Encienda la unidad
- 2 Visualmente inspeccione el oído y seleccione la oliva adecuada
- 3 Coloque la sonda en el oído hasta que ajuste cómodamente. Fije el clip de la sonda a la ropa.
- 4 Si desea utilizar el modo infantil asegúrese que el icono este seleccionado.

MADSEN Alpha (EOA)

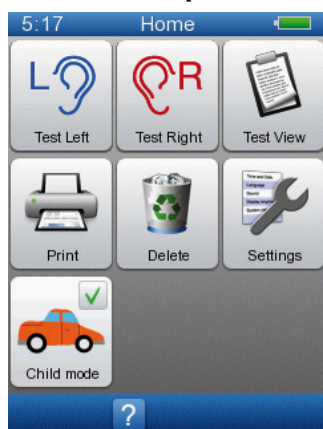


Seleccione el oído a examinar.

Se comprobará el altavoz y la calibración comenzará.

Si el ajuste de la sonda es aceptable, la prueba se iniciará automáticamente.

MADSEN Alpha (EOA+)

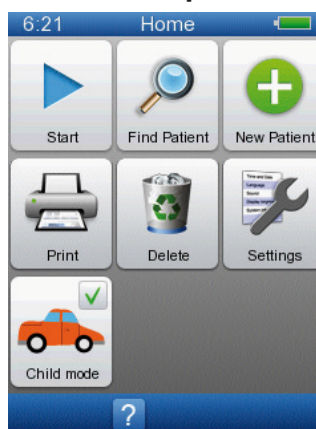


Para comenzar, seleccione Inicio o Buscar paciente (paciente ya ingresado) o Nuevo paciente (introducir un nuevo paciente).

Seleccione el protocolo y oído deseado.

Se comprobará el altavoz y la calibración comenzará. Si el ajuste de la sonda es aceptable, la prueba se iniciará automáticamente.

Al final de la prueba seleccione una de las siguientes opciones

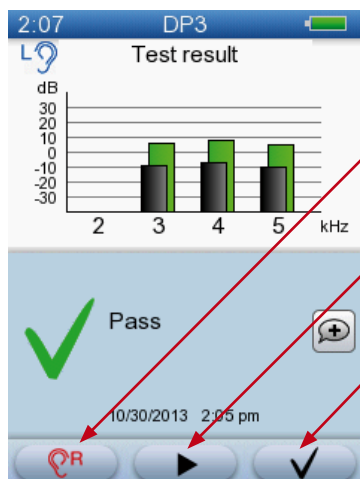

Examinar el otro oído



Re examinar el mismo oído

Salvar/ Finalizar

Guía rápida para la prueba de la sonda

La prueba de la sonda podrá iniciarse de dos maneras:

- 1 Colocando la sonda en la cavidad en la parte posterior del MADSEN Alpha
- 2 De la pantalla principal ingresando a ajustes, prueba de sonda y después colocando la sonda en la cavidad.

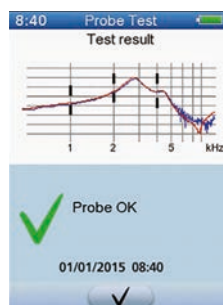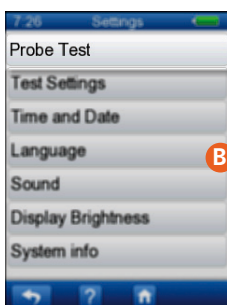

La sonda debe colocarse firmemente y directamente en la cavidad de prueba. Si no se hace correctamente se obtendrá una lectura incorrecta "Fail". Si esto ocurre, vuelva a colocar la sonda y reiniciar la prueba.

Se comprobará el altavoz y la calibración comenzará.